

SHRANITE NAVODILA

ADLEY PROFESIONALNI MASAŽNI STOL
Navodila za uporabo



※Products refer to the actual product, without prior notice.

Zahvaljujemo se vam za nakup omenjenega izdelka. Vljudno vas prosimo, da pazljivo preberete ta navodila in se seznanite s pravilno uporabo tega izdelka. Pozorno preberite tudi vsa pomembna varnostna opozorila. Vljudno prosimo, da navodila skrbno shranite.

Opozorilo: Naše podjetje si pridržuje pravico do spremembe oblike in opisa omenjenega izdelka brez vnaprejšnjega opozorila. Prosimo vas, da se sklicujete na barvo izdelka.

VSEBINA

Varnost in vzdrževanje	02
Ime in funkcija sestavnih delov	04
Funkcija & učinkovitost	05
Metoda uporabe	06
Podrobnosti o izdelku	10



1. POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Ne dovolite otrokom, da se dotikajo gibljivih delov izdelka.
- Prosimo uporabljajte le dobro ozemljeno električno omrežje, ki je primerno za ta izdelek.
- Prosimo izklopite vtičak po uporabi oz. pred čiščenjem in se tako izognite poškodbam na izdelku.
- Prosimo, da izdelek uporabljate skladno s temi navodili.
- Prosimo, da ne uporabljate dodatne opreme, ki ni primerna za ta izdelek.
- Izdelka ne uporabljajte zunaj.
- Pred uporabo pazljivo preberite ta navodila.
- Vsakršna uporaba, ki ni zapisana v teh navodilih je napačna in s tem prepovedana.
- Priporočena uporaba je 20 minut.
- Prosimo vas, da izdelka ne uporabljate, v kolikor je usnje strgano oz. poškodovano.
- Prosimo vas, da izdelka ne uporabljate, če je pokrov ali usnje poškodovano.
- Prosimo, da ne uporabljate izdelka če je hladilna luknja pokrita ali blokirana.
- Prosimo, da ne vrzite ničesar v izdelek.
- Prosimo, da ne zaspate med uporabo izdelka.
- Prosimo, da ne uporabljajte izdelka, če ste pod vplivom alkohola ali se ne počutite dobro.
- Prosimo, da ne uporabljajte izdelka najmanj eno uro po obroku.
- Prosimo, da ne uporabljajte premočne masažne funkcije v izogib poškodbam.

2. Okolje za uporabo

- Prosimo, da ne uporabljajte izdelka pod visokimi temperaturami in v vlažnem okolju, kot je kopalnica.
- Prosimo, da ne uporabljajte izdelka takoj, ko se temperature okolja močno spreminja.
- Prosimo, da ne uporabljajte izdelka v zelo prašnem ali kavstičnem okolju.
- Prosimo, da ne uporabljajte izdelka, kjer ni dovolj prostora ali ni dovolj zračno.

3. Ljudje, ki niso primerni za uporabo tega izdelka

- Ljudje, ki trpijo zaradi osteoporoze niso primerni za uporabo tega izdelka.
- Ljudje, ki trpijo zaradi boleznih srca ali uporabljajo elektronsko medicinsko opremo kot je srčni spodbujevalnik, niso primerni za uporabo tega izdelka.
- Ljudje, ki trpijo zaradi visoke telesne temperature, niso primerni za uporabo tega izdelka.
- Noseče ženske ali ženske, ki so v času menstruacije niso primerne za uporabo tega izdelka.
- Ljudje, ki so poškodovani ali imajo kožne bolezni, niso primerni za uporabo tega izdelka.
- Otroci mlajši od 14 let ali ljudje, ki niso sposobni upravljati tega izdelka, niso primerni za uporabo tega izdelka.
- Ljudje, katerim zdravnik naroči počivanje ali ki se ne počutijo dobro, niso primerni za uporabo tega izdelka.
- Ljudje, katerih telesa so mokra, je prepovedana uporaba tega izdelka.
- Naprava ima grelno površino, zato morajo osebe, ki so občutljive na vročino, biti previdne pri uporabi tega izdelka

4. Varnost

- Preverite, če je napetost primerna specifikaciji tega izdelka
- Ne imejte mokrih rok, ko izvlečete kabel.
- Ne dovolite, da gre voda znotraj izdelka, da bi se izognili električnemu šoku ali poškodbam izdelka.
- Ne poškodujte žic ali vezja tega izdelka.
- Ne uporabljajte vlažne krpe za čiščenje električnih delov, kot so stikala ali vtičak.
- Bodite stran od izdelka, če ni električnega toka, v izogib poškodbam, če se električni toki nenadoma vrne.
- Prenehajte uporabljati izdelek, če začne delovati neobičajno in se prosimo posvetujte s prodajalcem.
- Prenehajte uporabljati izdelek, če se ne počutite dobro in se posvetujte z zdravnikom.
- Ta naprava ni namenjena osebam (vključno z otroki) z zmanjšano uporabo telesne, senzorične ali duševne sposobnosti ali pomanjkanja izkušenj in znanja, razen če jim je bil zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.


5. Vzdrževanje

- Ta izdelek je potrebno vzdrževati z določenimi serviserji. Prepovedano je, da ga razstavljate ali sestavljate sami.
- Prosimo, da ne pozabite izklopiti/ugasniti izdelka po uporabi.
- Prosimo, da ne uporabljajte izdelka, če se priključek izgubi.
- Če izdelek dlje časa ne bo uporabljen, vas prosimo, da izključite priključek iz električnega napajanja in izdelek postavite na suho in ne prašno okolje.
- Izdelek ne hranite pri visoki temperaturi ali v bližini ognja in izogibajte se dolgotrajnemu izpostavljanju izdelka neposredno soncu.
- Če je snemljiv kabel / napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.
- Prosimo čistite izdelek s suho krpo. Ne uporabljajte topil, benzena ali alkohola.
- Mehanske komponente tega proizvoda so posebej oblikovane in narejene, zato jih ni potrebno posebno vzdrževati.
- Ne uporabljajte robov za potiskanje tega izdelka.
- Ne vrтите ali vlečite tega proizvoda po neravnem površju, pred premikom ga je potrebno dvigniti.
- Prosimo, da ga uporabljate v presledkih, ne da bi izdelek deloval dolgo neprekinjeno.

6. Rešitev navadnih napak

- Normalno je, da se sliši zvok motorja, ko je v uporabi.
- Če upravljaivec ne deluje pravilno, preverite vtič in vtičnico, če so med seboj močno povezane in se prepričajte, da je naprava vklopljena.
- Če je ocenjeni delovni čas potekel, bo naprava avtomatsko aktivirala gumb izklop. Če izdelek deluje neprekinjeno dolgo, bo temperaturni zaščitnik napravo samodejno izklopil. Naslednji vklop naj bo čez pol ure.


Ime in funkcija sestavnih delov

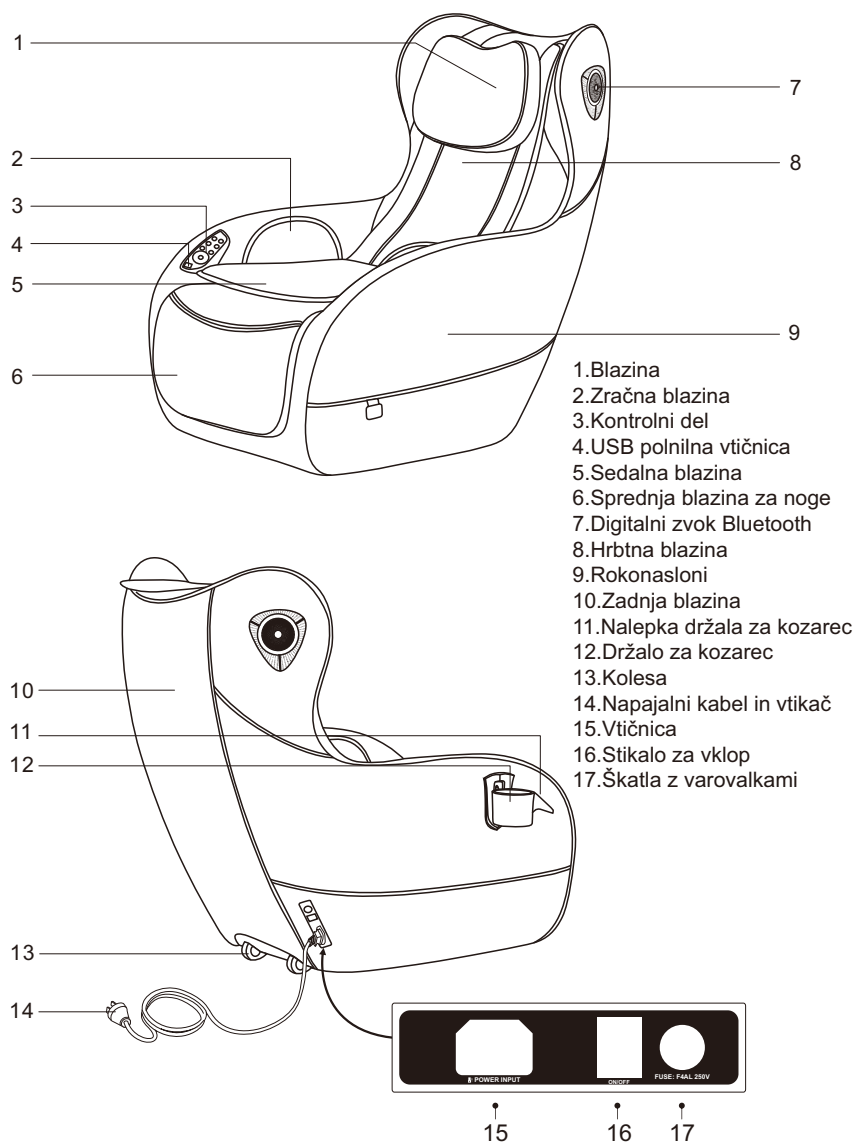

Funkcija

- Ta izdelek je zasnovan z 2 setoma ročic z masažnim mehanizmom. Ena je posebej zasnovana za vrat. Drugi set je izdelan z nizom štirikolesnega pogona mehanske masaže, ki se lahko pomika gor in dol v naslonjalnem delu. Programiranih je 3 vrste masaž s funkcijami: gnetenje, tapkanje, sinhrono gnetenje in tapkanje.
- Izdelan z avtomatskimi možnostmi: auto I, auto II, auto III in štiri avtomatske demo načine
- Ročicam z masažnim mehanizmom se lahko ročno prilagaja položaj. Pozicije se lahko natakavljajo glede na vaše potrebe. Funkcija gnetenja in tapkanja ima 3 stopnje hitrosti.
- Samostojni set za masažo vratu z gnetenjem: Možnost enosmernega ali dvosmernega gnetenja vratu. Poljubno lahko nastavljate pozicijo masažnega seta za vrat in ramena.
- Set z masažo zračnega tlaka: Možnost masiranja zadnjice z zračnim tlakom v 3. stopnjah hitrosti.
- Funkcija ogrevanja vratu in ramen. Za infrardeči vir ogrevanja so uporabljena ogljikova vlakna.
- Možnost polnjenja preko USB vtičnice.
- Možnost povezave z pametnimi napravami preko bluetootha in brezžično predvajanja glasbe.
- Možnost predvajanja glasbe preko sistema, z dvema 3D-digitalnima zvočnikoma na ramenih.
- Možnost uživanja masaže od ramen do stegen, zaradi dolgega in ukrivljenega tira, ki se oblikuje po vašem telesu.
- Povrnitev masažnih rok, ko se izdelek izključi.
- Sedež ima dodatno blazino, s katero lahko lajšate intenzivnost masaže na vaši zadnjici. Uporabnik se lahko sam odloči ali jo bo uporabljal ali ne, lahko jo tudi odstrani.

Način uporabe

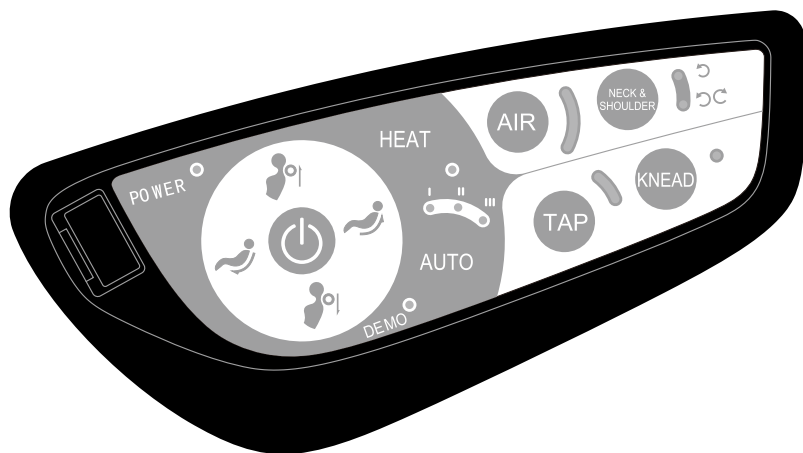

Opozorilo: Podrobnosti si oglejte na tipkah dejanskega artikla.

1. Vključite napravo



2. Začnite masažo

- ① Pritisnite rdeči gumb za začetek masaže
 - ② Naprava se vklopi z načinom Auto I. Načine lahko izbirate poljubno.
- A). Avtomatska masaža

Gumb	Opis	Značilnost	Zaslon
Avtomatska masaža	Auto	Auto I : Masaža celotnega telesa, sprostitev bolečine	Glej svetlobo gumba
		Auto II : Masaža fokusirana na vrat in hrbet	Glej svetlobo gumba
		Auto III: Masaža fokusirana na pas, zadnjico in stegna	Glej svetlobo gumba
		Demo: Nastavitev hitre 5 minutne masaže	Glej svetlobo gumba

Način uporabe

B). Ročno nastavljiva masaža

Gumb	Opis	Značilnost	Zaslon
Funkcija	KNEAD	Za prižig ali izklop masaže z gnetenjem pritisnite ta gumb.	Glej svetlobo gumba
	TAP	Za prižig ali izklop masaže z tapkanjem pritisnite ta gumb. Možne tri stopnje: šibka, srednja in močna.	Glej svetlobo gumba
Nastavitev pozicije masaže		Pomik masažnih ročk navzgor.	Glej svetlobo gumba
		Pomik masažnih ročk navzdol.	Glej svetlobo gumba

C). Masaža vratu in ramen

Gumb	Opis	Značilnost	Zaslon
Funkcija	Neck & shoulder	Dvosmerno gnetenje in enosmerno gnetenje.	Glej svetlobo gumba
Gretje vratu in ramen	Heating	Za vklop ali izklop gretja vratu in ramen pritisnite ta gumb.	Glej svetlobo gumba
Nastavitev pozicije masaže		Pomik masažnih ročk za vrat in ramena navzgor.	Glej svetlobo gumba
		Pomik masažnih ročk za vrat in ramena navzdol.	Glej svetlobo gumba

D). Masaža zadnjice z zračnim tlakom

Gumb	Opis	Značilnost	Zaslon
Zračni tlak	AIR	Masaža zadnjice z zračnim tlakom, tri stopnje intenzivnosti: močna, srednja in šibka.	Glej svetlobo gumba

Način uporabe

3. Nastavitve bluetooth zvočnika

Metoda upravljanja:

- Vstopite v menu pametne naprave, vklopite "Setting" --izberite "Bluetooth" --
Vklopite "Bluetooth" --Avtomatsko iskanje novih Bluetooth naprav.
- Pametna naprava bo sama našla ustrezno Bluetooth napravo (npr. MCM-0066),
in vprašala za povezavo, izberite "YES" ali "CONFIRM".
- Vnesite geslo "0000" ali "1234", nato "CONFIRM", da vzpostavite povezavo.
- Odprite predvajalnik glasbe na vaši pametni napravi in izberite glaslo, ki jo želite predvajati.

Opozorilo : Vsaka Bluetooth naprava ima svoj naziv pri iskanju naprav, kot so "IMCM-0066 ali IMCM-0061 ali IMCM-0088... etc". Vsaka naprava je drugačna.

4. Izklop / konec masaže



- Ob pritisku na rdeč gumb, se bo naprava ugasnila, vse masažne funkcije se bodo ustavile in povrnila v prvotni položaj.
- Po ponastavitvi izklopite napajanje.

Slika (Izklopite napajanje naprave)





5. Nastavitve držala za kozarec

1. Vzemite masažni stol iz škatle (fig.1)
2. Vzemite držalo za kozarec iz vreče z dodatno opremo. Poravnajte držalo za kozarec z dvema luknjama na pritrtilni plošči pokrova na sedežu (fig2).

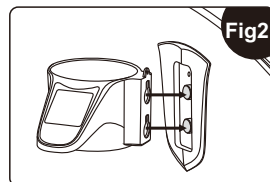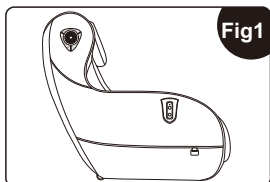

3. Pritrdite držalo za kozarec na sedež z vijaki, ki ste jih dobili v paketu za sestavo (fig3).


4. Po končanem nameščanju držala za kozarec na stol, preverite ali je namesitev pravilna ali ne (fig4).

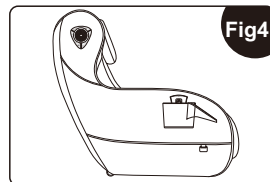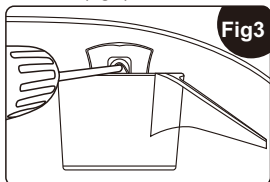

Način uporabe



6. Uporaba sedalne blazine

Z dodatno blazino za sedišče, lahko razbremenite trdoto na zadnjici. Uporabnik se lahko sam odloči ali jo bo uporabljal ali ne. Lahko jo odstranite.

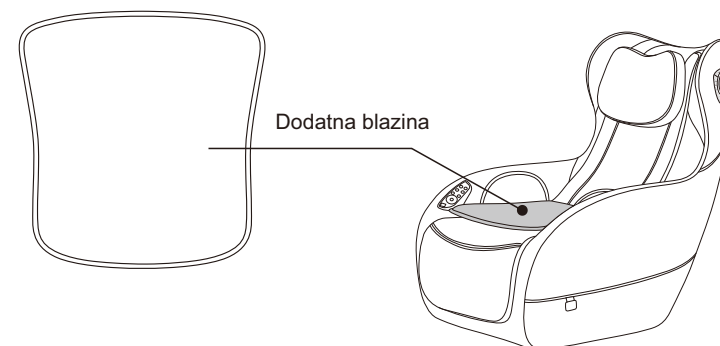

7. Zaščita tal


- Postavitev težkih masažnih stolov na lesena tla lahko ob daljši uporabi poškoduje tla. Zato svetujemo postavitev stola na preprogo ali drugo podlago.

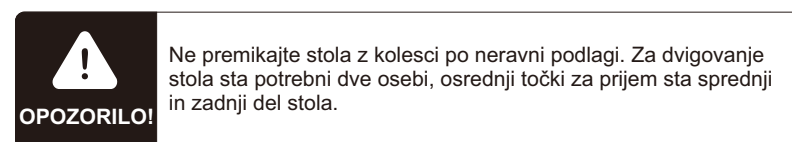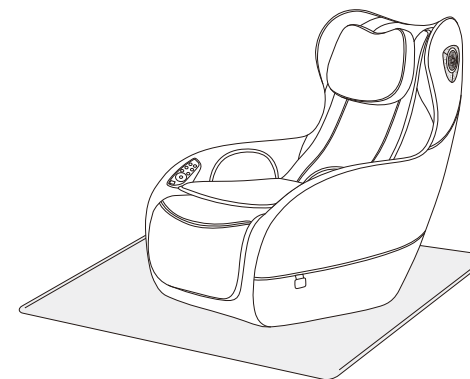

Način uporabe

8. Način premikanja

Prepričajte se, da so med premikanjem vsi kabli nad tlemi. Nagnite naslonjalo za hrbet proti tlorav položaj, kjer začitite, da sloni na kolesih (približno 25 stopinj). Z rokami ga potisnite naprej in nazaj v ustrezen položaj in počasi in nežno spustite nazaj na tla.

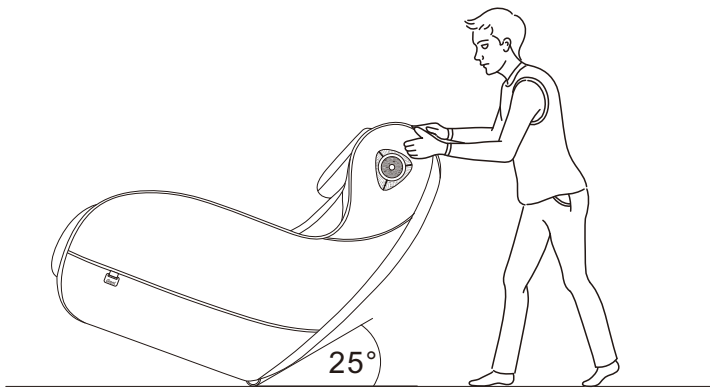

OPOZORILO!

Pred prestavljanjem morate najprej izklopiti napajanje in nato izvleciti električni kabel iz vtičnice.

Podrobnosti o izdelku

Model: A155

Ime: Masažni stol

Napetost: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz

Moč: 60W

Zvok: ≤ 55dB

Okviren čas uporabe: 20Min

Varnostna zasnova: Class I

Predstavitev materialov: PVC, PA (poliakril), jekleni, električni in elektronski deli

MATERIAL	PU	USNJE	TKANINA	LES